


## TERMOMETRO DIGITALE

Leggete con cura le istruzioni seguenti prima dell'uso.

Il termometro digitale è un dispositivo per la misurazione della temperatura corporea, indicato sia per uso ospedaliero che familiare. Rispetto ai modelli tradizionali in vetro e mercurio, ha i vantaggi di una semplice lettura, veloce e accurata misurazione, memorizzazione, allarmi, ecc.

In particolare risulta maggiormente sicuro per la persona e l'ambiente poichè senza mercurio.

Il termometro è stato calibrato dal fabbricante e non sono necessarie successive calibrazioni. Per qualsiasi dubbio sulla precisione dello strumento contattate il Vostro rivenditore.

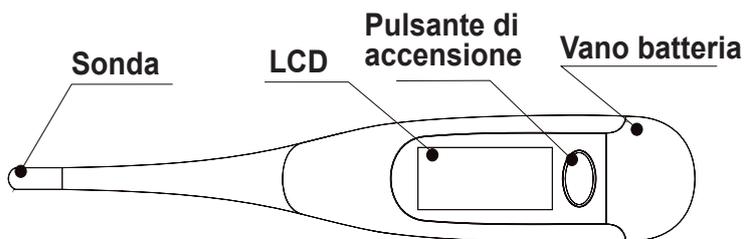

### Caratteristiche tecniche

Gamma di misura: 32~42 °C / 89,6~107,6 °F  
 Precisione: ± 0,1 °C / 0,2 °F (35,5~42,0 °C / 95,9~107,6 °F)  
 ± 0,2 °C / 0,4 °F (32~35,5 °C / 89,6~95,9 °F)  
 Durata batteria: 100 ore circa di utilizzo continuativo

### Utilizzo

- Prima dell'uso disinfettate la sonda o posizionate un coprisonda sulla punta.
- Premete il pulsante di accensione, avvertirete un bip.
- Dopo il test di controllo iniziale il display visualizza l'ultima misurazione effettuata per 2 secondi.
- Quando appare sul display "Lo" e inizia a lampeggiare la lettera °C o °F è possibile iniziare la misurazione.
- Durante la misurazione restate nello stesso luogo/posizione fino al termine.
- Sul display viene visualizzata in continuo la temperatura misurata.
- La misurazione è completata quando si raggiunge un valore costante e il termometro emette dodici bip.
- E' possibile che continuando la misurazione dopo il bip, il valore misurato salga ancora leggermente.
- Il termometro si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto, in ogni caso per prolungare la durata della batteria è consigliabile spegnerlo dopo l'uso premendo il pulsante.
- Per cambiare la scala di misura (tra °C e °F) tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi a termometro spento. Sul display apparirà la lettera "b" e la scala attualmente impostata. Per cambiare la scala di misura premere nuovamente il tasto di accensione, la nuova impostazione viene salvata in automatico dopo 3 secondi.

### Metodi di misurazione

- Per le misurazioni nel retto, inserite delicatamente il sensore nel retto. Non muovetevi fino al termine della misurazione. Il tempo di misurazione va da circa 20 a 30 secondi.

- Per le misurazioni sotto la lingua, prima di iniziare non aprire la bocca per 5 minuti circa. Posizionate il sensore sotto la lingua in una posizione stabile, non aprire la bocca fino al termine della misurazione. Non mangiare o bere prima della misurazione. In genere la temperatura orale è di 0,3 °C a 0,8 °C inferiore rispetto alla temperatura rettale. Il tempo di misurazione va da circa 10 a 15 secondi.



**Disinfettate la sonda solo con alcol o disinfettanti equivalenti, NON bollire il termometro! NON sterilizzare in autoclave!**

**Il termometro può essere lavato sotto acqua corrente, in ogni caso NON immergere il prodotto!**

**Evitate l'esposizione diretta ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Non misurate temperature diverse da quella corporea!**

### Sostituzione batteria

- La batteria deve essere sostituita quando sul display appare il simbolo .
- Sfilate delicatamente il cappuccio posteriore e rimuovete la vecchia batteria con l'aiuto di uno stuzzicadenti o un punteruolo.
- Inserite una nuova batteria da 1,5 V (LR/SR-41).
- Riposizionate il cappuccio posteriore



**Non smontate il prodotto se non per le operazioni necessarie al cambio batteria!**

**Non lasciare le batterie o il cappuccio posteriore alla portata dei bambini!**



**Lo smaltimento del prodotto o della batteria deve essere effettuato rispettando le norme vigenti nel Vostro paese.**

