


# Manuale d'Uso e Manutenzione

## Sistemi di imbracatura (34099 )

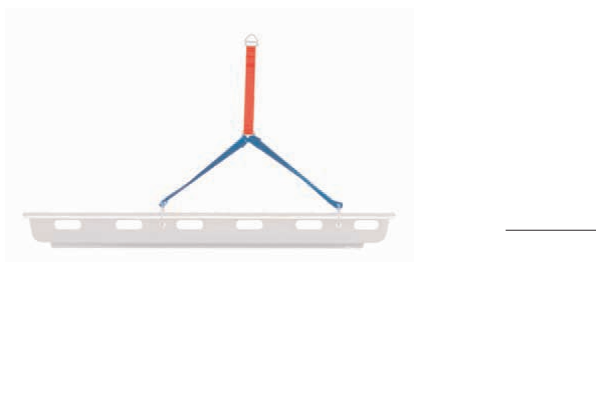

Si dichiara che il dispositivo è conforme alla Direttiva 93/42/CEE "Dispositivi Medici".

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato TÜV Product Service GmbH.

### 3.2 COMPONENTI PRINCIPALI

1. Nastro in nylon
2. Ganci di ancoraggio in metallo
3. Fibbie di scorrimento in metallo

### 3.3 MODELLI

34099

Sistema di imbracatura regolabile

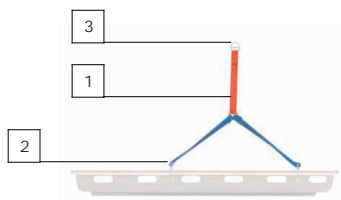


Fig. A

### 3.4 DATI TECNICI

Sistemi di imbracatura		34099	
Lunghezza nastro	massima 1680 mm minima 1250 mm		
Larghezza nastro	50 mm / 20 mm		
Peso	1,8 kg		
Materiale	nylon, alluminio, acciaio		
Tipo di fissaggio	moschettoni		
Numero di fasce di fissaggio	4		
Compatibilità	tutte le barelle basket		
Portata del sistema	280 kg		

### 3.5 CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C

Temperatura di stoccaggio: da -20 a +60 °C

Umidità relativa: da 5 a 85%

## 4 | ISTRUZIONI OPERATIVE

### 4.1 TRASPORTO E STOCCAGGIO

Prima di effettuare il trasporto del dispositivo assicurarsi di averlo imballato adeguatamente e di essersi adoperati affinché non sussistano rischi di urti o cadute durante il trasporto stesso.

Conservare l'imballo originale per eventuali successivi trasporti. Danni al dispositivo causati durante il trasporto e la movimentazione non sono coperti da garanzia. Riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate sono a carico del cliente. Lo stoccaggio del dispositivo deve avvenire in luoghi asciutti e privi di umidità.

### 4.2 PREPARAZIONE

Al ricevimento del prodotto:

- rimuovere l'imballo e disporre il materiale in modo visibile
- controllare tutti i pezzi compresi nella lista di accompagnamento

Il dispositivo va controllato prima di ogni messa in servizio, in modo da poter rilevare anomalie di funzionamento e/o danni dovuti al trasporto e/o immagazzinamento.

Prima e dopo ogni utilizzo, effettuare un controllo come segue:

- Il dispositivo mostra sulla sua superficie tagli, fori o abrasioni?
- I componenti del dispositivo si presentano integri?
- Le cinture si piegano in modo adeguato?
- I ganci funzionano correttamente?
- Le regolazioni sono scorrevoli?

Se tutto è regolare, il dispositivo è pronto per essere utilizzato.

### 4.3 FUNZIONAMENTO 4.3.1 UTILIZZO DEL SISTEMA 34099.

Fissare i quattro moschettoni agli appositi punti predisposti della barella basket. Prima di procedere al sollevamento, verificare il corretto aggancio dei moschettoni.

2. Regolare la lunghezza dei nastri in modo tale da rendere orizzontale la barella quando viene sollevata.
3. Utilizzare l'anello posto alla sommità del sistema per sollevare la barella.
4. Verificare che i nastri e i moschettoni non interferiscano con il paziente o con altri dispositivi in uso.