

TEST RAPIDO ELICOBATTERO PYLORI

Contenuto dell'imballo:

- Busta sigillata (contenente: dispositivo per il test e contagocce);
- Fiala di soluzione per il test;
- Lancetta pungidito;

Materiale necessario ma non fornito:

- Timer o orologio con lancetta dei secondi.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI EFFETTUARE IL TEST

Prima di iniziare il test

Conservare il dispositivo per il test a temperatura ambiente (15 - 30 °C o 59 - 86 °F). Non utilizzare il test dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Se dovessero presentarsi domande o dubbi riguardo a istruzioni o risultati, consultare la sezione "Domande e Risposte" alla fine di questo documento.

Uso previsto

Questo test viene utilizzato per individuare gli anticorpi dell'Ellicobattero pylori (H.pylori). La ricerca ha dimostrato che la presenza di anticorpi H.pylori nel sangue può essere concomitante alla presenza di gastriti, ulcere o, in casi più gravi, di cancro allo stomaco.

Limiti del test

- Il presente test è un test di monitoraggio limitato all'analisi degli anticorpi H.pylori nel sangue.
 - Il test è esclusivamente per uso diagnostico in vitro (esterno).
 - Benchè il test sia accurato nell'analisi degli anticorpi H.pylori, si possono verificare un piccolo numero di risultati falsati.
 - Come con tutti i test rapidi, una diagnosi definitiva non deve essere fatta sulla base del singolo test, ma deve essere effettuata da un medico dopo la valutazione di vari esami clinici e di laboratorio.
- NOTA:** Se il risultato del test è positivo, consultare il medico per una conferma e per iniziare un trattamento. Se il risultato è negativo ma non ci si sente bene o se si hanno dubbi sulla propria salute, consultare il medico per ulteriori accertamenti.
- Questo dispositivo di test può essere utilizzato una sola volta. Gettarlo dopo l'uso.
 - Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

DOMANDE E RISPOSTE

Che cos'è l'H.pylori?

L'Ellicobattero pylori (H.pylori) è un batterio che infetta lo stomaco e può causare gastriti e ulcere allo stomaco.

Come funziona questo test?

Questo test ricerca gli anticorpi prodotti dal corpo in conseguenza dell'infezione causata dall'H.pylori. Se gli anticorpi sonopresenti, il test fornisce un risultato positivo. Questo test è progettato per mostrare la presenza di anticorpi per il batterio H.pylori nel sangue.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Dopo essersi lavate le mani, aprire la busta sigillata strappando lungo la linea indicata ed estrarre il dispositivo per il test e il contagocce.
2. Strofinare il dito sul quale si intende effettuare il prelievo di sangue con il tamponcino imbevuto di alcool; prendere la lancetta pungidito, rimuoverne il tappo e procedere come segue:
 - Tenere stretto il dito e facendo pressione spingere il sangue verso la punta del dito (figura 1);
 - Posizionare l'estremità rossa della lancetta contro il dito e premere con forza come mostrato in figura 2;
 - Premere il dito e assicurarsi che fuoriesca una quantità sufficiente di sangue (figura 3).

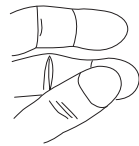


Figura 1

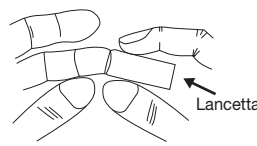


Figura 2

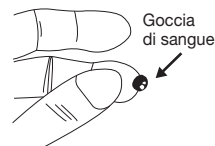


Figura 3

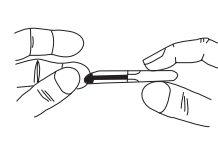


Figura 4



Figura 5



Figura 6

TEST ELICOBATTERO



Dispositivo medico-diagnostico in vitro



Conservare a 15-30°C



PUNGIDITO



Fabbricante
MediPurpose Pte. Ltd.
15 Hoe Chiang Road # 12-02
Tower Fifteen - 089316 Singapore



Rappresentante Europeo Autorizzato
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 St. Ingbert D66386 Germany



Codice prodotto
24529



Monouso



Conservare al riparo
dalla luce solare diretta



Teme l'umidità



Leggere le istruzioni



Sterile raggi gamma




Monouso

9. Fare partire l'orologio e leggere i risultati dopo esattamente 10 minuti.
 10. Lettura dei risultati - Nella finestra dei risultati sono presenti un'area di controllo indicata da una "C" ed un'area di test indicata da una "T".
 - Appare una linea nell'area di controllo: il test è negativo (figura 7).
 - Appaiono due linee, una nell'area di controllo e una nell'area di test: il test è positivo (figura 8).
 - Non appare alcuna linea o appare una linea nell'area di test: il test è nullo e deve essere ripetuto (figura 9).
- NOTA:** Il colore e l'intensità delle linee non devono essere presi in considerazione. Una linea potrebbe essere più scura dell'altra. Se la linea è visibile e non interrotta, il risultato deve essere interpretato come sopra.
11. Non leggere il risultato nè prima nè oltre i 10 minuti.
 12. Contattare in ogni caso il medico per discutere il risultato del test.



Risultato
negativo
Figura 7

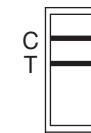

Risultato
positivo
Figura 8



Risultato
non valido
Figura 9

TEST RAPIDO PER AUTODIAGNOSI ELICOBATTERO PYLORI

Istruzioni per l'uso

ATTENZIONE:
Gli operatori devono leggere e capire
completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.



0197