

RS936 **Sedile per vasca bagno**

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno girevole, struttura in acciaio verniciato, seduta in polipropilene. Due battute laterali di sicurezza

Immagine prodotto



Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice di classificazione GMDN

34936

Codice di classificazione CND

Y093303

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.

100 Kg

Confezionamento

Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura

Acciaio

Seduta

Polipropilene

DIMENSIONI

Dimensione sedile

40 x 35 Cm

Altezza

38 Cm

Peso

5 Kg

Larghezza totale

73 Cm

Profondità totale

53 Cm



• RS936

**SEDIA GIREVOLE PER VASCA
MANUALE D'ISTRUZIONI**

**TURNING BATH CHAIR
INSTRUCTION MANUAL**


Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RS936

Grazie per aver acquistato la sedia girevole per vasca della linea **MOPEDIA**, fabbricata secondo i più alti standard di qualità e sicurezza e conforme alla direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE). Struttura realizzata in alluminio verniciato bianco, movimento in acciaio inox e seduta in plastica.

Montaggio

Il prodotto viene fornito in due parti: la base di supporto (A) per vasca ed il sedile (B).

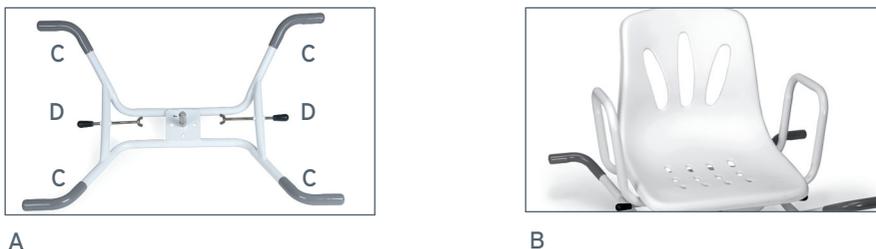

Inserire il sedile nella base di supporto e fissare il tutto attraverso la vite in dotazione (FIG. 1).



FIG. 1

Appoggiare la base sulla vasca facendo in modo che i supporti laterali (C) appoggino sui lati della vasca.

Regolare i perni laterali (D) in modo che contrastino sulle pareti della vasca per avere maggiore stabilità (FIG. 2).



FIG. 2

Per far girare il sedile utilizzare la leva (E) posizionata vicino al bracciolo destro (FIG. 3).



FIG. 3

Uso

Ruotare il sedile in modo da posizionarlo di fronte al paziente.

Aiutare il paziente a posizionarsi sulla sedia.

Ruotare nuovamente il sedile posizionando il paziente all'interno della vasca.

Pulizia:

Utilizzare un panno umido ed un normale detergente per ambienti. Si raccomanda di non immergere completamente i componenti in acqua. Far scolare l'acqua dopo ogni utilizzo ed asciugare accuratamente le parti.

Avvertenze

Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg.

Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

- Verificare che il prodotto vi sia stato consegnato in perfetto stato prima di usarlo.
- In caso di dubbi sull'utilizzazione, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore.
- I pezzi usurati, danneggiati o mancanti dovranno essere sostituiti.
- Non conservare il prodotto all'esterno.
- Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così come lo stato delle protezioni in gomma.
- Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile.
- Evitare durante il posizionamento movimenti bruschi
- Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi in genere, potrebbero rendere difficile il posizionamento del paziente.

GARANZIA

La sedia girevole per vasca è garantita **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Nel rispetto delle suddette condizioni per l'esercizio della garanzia, inviare la sedia girevole per vasca munita della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ **Località / Place** _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ **Località / Place** _____