

**MOPEDIA®**

MA RP400\_401\_402\_410\_411\_412\_03 B\_12-2016

**RIALZI PER WATER  
MANUALE DI ISTRUZIONI**

---

**RAISED TOILET SEAT  
INSTRUCTION MANUAL**

**INDICE**

<b>1. CODICI .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>3. DESTINAZIONE D'USO.....</b>	<b>pag.3</b>
<b>4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .....</b>	<b>pag.3</b>
<b>5. AVVERTENZE GENERALI.....</b>	<b>pag.4</b>
<b>6. VISTA DELLE PARTI .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>7. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE .....</b>	<b>pag.4</b>
<b>8. ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>9. PRECAUZIONI .....</b>	<b>pag.5</b>
<b>10. CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>pag.5</b>
<b>11. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI.....</b>	<b>pag.5</b>
<b>12. GARANZIA.....</b>	<b>pag.6</b>
<b>13. RIPARAZIONI.....</b>	<b>pag.6</b>
<b>13.1 Riparazioni in garanzia.....</b>	<b>pag.6</b>
<b>13.2 Riparazione di un prodotto non coperto da garanzia .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>13.3 Prodotti non difettosi .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>14. RICAMBI .....</b>	<b>pag.6</b>
<b>15. CLAUSOLE ESONERATIVE .....</b>	<b>pag.6</b>

**CE** Dispositivo Medico di classe I D.Lgs 24/02/97 n.46  
attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

## 1. CODICI

<b>RP400</b>	Rialzo per water con fermi (6 cm)
<b>RP410</b>	Rialzo per water con fermi e coperchio (6 cm)
<b>RP401</b>	Rialzo per water con fermi (10 cm)
<b>RP411</b>	Rialzo per water con fermi e coperchio (10 cm)
<b>RP402</b>	Rialzo per water con fermi (14 cm)
<b>RP412</b>	Rialzo per water con fermi e coperchio (14 cm)

## 2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il rialzo per water della linea MOPEDIA. Il suo design e la sua qualità garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza ed affidabilità. I rialzi per water MOPEDIA sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi la preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

## 3. DESTINAZIONE D'USO

L'alzawater MOPEDIA è un ausilio destinato ad aiutare persone con difficoltà di movimento nell'uso del wc.

### ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Si declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

## 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il produttore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dallo stesso e facente parte della famiglia letti da visita elettrici è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo si garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue: 1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva 2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA 3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE 4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE 5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I 6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista.


7. Il produttore mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

## 5. AVVERTENZE GENERALI

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale


- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili e comunque non superiori a 10 anni
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini
- Si consiglia l'uso ad un solo paziente
- Sanificare il dispositivo prima di ogni utilizzo

## 6. VISTA DELLE PARTI

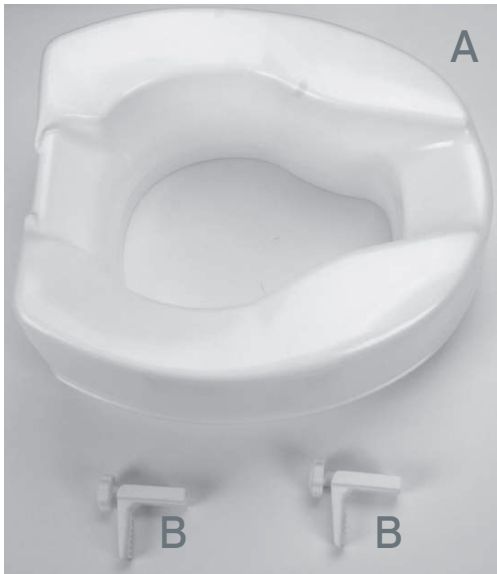

- A. Rialzo  
B. Staffe

## 7. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

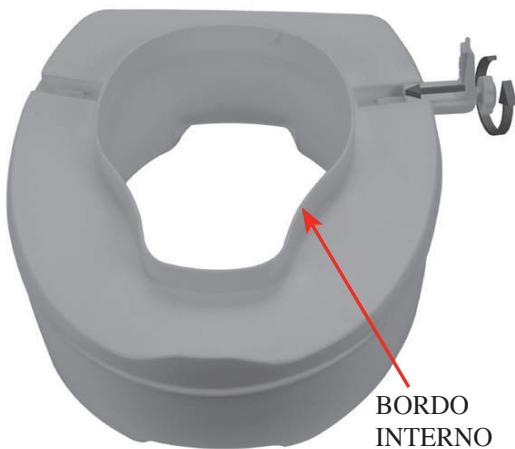

1. Inserire le staffe laterali di bloccaggio procedendo nel seguente modo: capovolgere l'alzawater MOPEDIA appoggiandolo su di una superficie piana e stabile. Inserire le due staffe nelle apposite guide laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole delle viti in senso orario per assicurare le staffe sull'alzawater


**ATTENZIONE!**

Se la manopola gira a vuoto: spingere bene la staffa contro la filettatura impressa nel rialzo mantenendo una pressione costante sulla manopola. Così da garantire il contatto tra vite e filettatura. All'occorrenza dare dei leggeri colpi premendo sulla manopola e girando la stessa.

**N.B.** In questa fase non avvitare a fondo le staffe altrimenti non sarà possibile posizionare il rialzo MOPEDIA sulla ceramica del wc

2. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare l'alzawater MOPEDIA sulla ceramica del wc con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc, prestando attenzione ad inserire il bordo interno, tutto all'interno del wc e il bordo anteriore fuori dal wc

**N.B.** L'alzawater si dovrà trovare perfettamente in piano sulla ceramica del WC

3. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, quindi assicurarsi che l'alzawater MOPEDIA sia ben fissato sul wc e non si possa muovere


**ATTENZIONE!**

Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l'operazione di regolazione semplice e senza sforzo, è però importante non continuare a girare la manopola ulteriormente qualora la staffa sia giunta nella posizione di contatto con il wc.






**8. ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO**

Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro. L'alzawater MOPEDIA può essere immerso totalmente in acqua e disinfettato con prodotti specifici.

**9. PRECAUZIONI**

- Non superare la portata massima di 250 kg
- Prima dell'uso assicurarsi sempre che l'alzawater MOPEDIA sia ben fissato al wc e che non presenti danni da compromettere la stabilità del prodotto
- Non usare l'alzawater come supporto per alzarsi e sedersi sul wc

**10. CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Dimensioni esterne</b>	 L: 40,7 cm	 P: 36,6 cm
<b>Bordo inferiore di inserimento all'interno del wc</b>	 L: 27,5	 P: 21,5 cm
 <b>Portata massima</b>	250 kg	

**11. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI**

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti

**RP431N**

Kit viti

**RP432**

Bidet (optional)