

MANUALE UTENTE

NOME PRODOTTO:

Sonda rettale monouso.

DESTINAZIONE D'USO:

Inserire la sonda nel retto per pulirlo, togliere le feci, o iniettare il medicinale.

INDICAZIONI D'USO

Aprire la confezione, estrarre la sonda rettale e lubrificare la sonda. Introdurla delicatamente nel retto e intervenire secondo necessità. Infine togliere la sonda.

NOME PRODOTTO:

Sonda stomaco monouso.











DESTINAZIONE D'USO:

Somministrazione di sostanze nutritive e alimenti liquidi.

INDICAZIONI D'USO

Aprire la confezione, estrarre la sonda stomaco e lubrificare la sonda. Introdurre delicatamente la sonda dal naso o dalla bocca e inserirla nell'esofago. In base alla fisiologia dell'individuo la sonda raggiungerà lo stomaco ad una lunghezza di 45-55 cm per gli adulti e 18-24 cm per i bambini. Introdurre il tubo di raccordo in una bacinella con acqua, l'eventuale presenza di bolle rileva che il tubo è stato introdotto nell'endotrachea e non nello stomaco. In questo caso occorre inserire nuovamente la sonda. Dopo aver inserito la sonda nello stomaco occorre regolare il tubo di raccordo. In seguito procedere con la somministrazione di sostanze nutritive o alimenti liquidi. Togliere la sonda tutti i giorni.

SIMBOLI:

Simbolo	Definizione del simbolo
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso
	Il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici
	Numero di lotto
	Indirizzo fabbricante
	Codice prodotto
	Non esporre ai raggi solari
	Teme l'umidità
	Monouso
	Non utilizzare nel caso la confezione sia danneggiata
	Sterilizzato a ossido di etilene

SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito in base alle leggi nazionali. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle sanzioni.



Jiangsu Suyun Medical Materials co., Ltd.
No. 1 Medicine Lane, Renmin Road, 222002 Lianyungang, P.R.C.



Shanghai International Trading Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse, 80, D-20537, Hamburg, Germany