

SINUS A

Doccia nasale

Flacone 120 ml + 12 bustine saline

SINUS A


Composizione: Sodium Cloride, Sodium Bicarbonate

Caratteristiche: i lavaggi nasali alleviano i sintomi causati dalle allergie, dalla sinusite, dalla secchezza dell'aria, dalla congestione nasale, dal raffreddamento e dalla rinite gravidica. Test clinici dimostrano che sono in grado di ridurre sensibilmente i problemi legati ai condotti nasali e aiutano a ritrovare una corretta respirazione. Nel flacone è presente una soluzione salina per il lavaggio del naso; si tratta di un prodotto completamente naturale e sicuro per gli adulti, per i bambini sotto i 12 anni, per le donne in stato di gravidanza o allattamento e per i pazienti in cura con altri medicinali. È sufficiente diluire una bustina di sali premiscolati in acqua tiepida all'interno del flacone in dotazione, mescolare bene e spremere per pulire i condotti nasali.

Indicazioni: consente di eliminare sintomi quali raffreddore, congestione nasale e secchezza delle narici. Combatte allergie nasali e irritazione nasale dovuta a polvere, fumo, peli di animale, erba, polline e smog.

NON ADATTO A BAMBINI SOTTO I 12 ANNI

Modalità d'uso: introdurre il contenuto di 1 bustina nel flacone (02). Riempire con acqua fino a 120 ml e mescolare bene (03 e 04). Posizionare il beccuccio in ognuna delle due narici (05). Spremere il flacone (06). Ripetere fino a sentire il flusso di soluzione passare attraverso la narice opposta; ripetere nuovamente per decongestionare il naso. Vedere le figure sotto riportate.

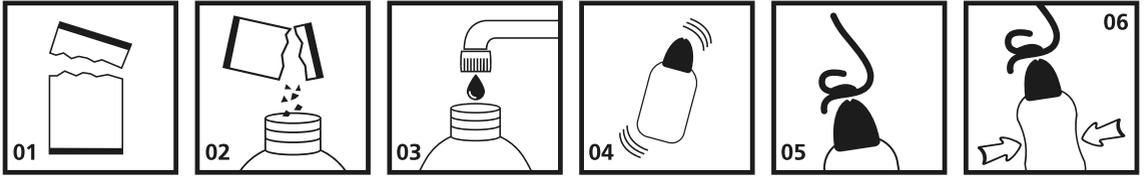

Dosaggio: adulti e bambini sopra i 12 anni. 1-2 bustine ogni minimo due ore per tutta la durata necessaria.

Attenzione: interrompere immediatamente il trattamento e consultare il medico se il lavaggio risulta fastidioso o se i sintomi persistono. Il prodotto è adatto all'utilizzo esclusivo da parte di una persona. Lavare con acqua e sapone dopo ogni utilizzo.

Effetti collaterali: i casi di effetti collaterali riportati in seguito ad un utilizzo corretto del prodotto sono minimi e considerati minori. Si tratta perlopiù di prurito e di una leggera sensazione di pizzicore nel naso. Interrompere il trattamento e consultare il medico se si riscontra una reazione allergica dovuta all'utilizzo del prodotto.

La doccia nasale Sinus è sicura anche in caso di gravidanza e allattamento.

Conservazione: tenere lontano le bustine dal calore eccessivo e dall'umidità, preferibilmente tra i 15 e i 30°C. Utilizzare entro 12 mesi dall'apertura.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Confezione: Flacone 120 ml + 12 bustine saline (3g).

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Contattare il medico se l'irritazione persiste.



REF 28084 / T1015.428.0001



Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik
Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yakuplu Mahallesi, Birlik Caddesi, No: 32/1,
34524 Beylikdüzü / İstanbul / TURKEY



SINUS **A**

	<p>Conservare in luogo fresco ed asciutto Keep in a cool, dry place À conserver dans un endroit frais et sec Conservar en un lugar fresco y seco</p>
	<p>Conservare al riparo dalla luce solare Keep away from sunlight À conserver à l'abri de la lumière du soleil Conservar al amparo de la luz solar</p>
	<p>Leggere attentamente le istruzioni per l'uso Please read instructions carefully Lire attentivement la notice Leer atentamente las instrucciones de uso</p>
	<p>Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso Read instructions carefully Lire et suivre attentivement la notice Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso</p>
	<p>Data di scadenza Expiration date Date d'échéance Fecha de caducidad</p>
	<p>Prodotto conforme alle Direttive Europee n. 93/42/CE Product complies with European Directive n. 93/42/EC Ce produit est conforme à la directive européenne n.93/42/CE Producto conforme a la Directiva Europea nº 93/42/CE</p>
	<p>Codice prodotto Product code Code produit Código producto</p>
	<p>Numero di lotto Lot number Numéro de lot Número de lote</p>
	<p>Fabbricante Manufacturer Fabricant Fabricante</p>
	<p>Conservare tra 15 e 30°C Store between 15 and 30°C À conserver entre 15 et 30°C Conservar entre 15 y 30°C</p>
	<p>Data di fabbricazione Date of manufacture Date de fabrication Fecha de fabricación</p>