





FAQ

MONITOR

Se non è possibile abbinare il dispositivo al manichino seguendo i passaggi indicati, è necessario ripristinare il monitor. Ripristinare il monitor: premere il pulsante "Adulto-Bambino" per circa 7 secondi fino a quando le icone di frequenza  e compressione  lampeggiano una volta. Spegner il monitor  e riavviare il processo di abbinamento.

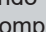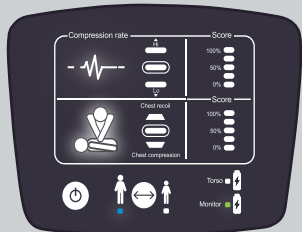

BATTERIA

Le batterie fornite con la confezione Practi-Man Plus devono essere sostituite quando l'indicatore del monitor si illumina in rosso.

L'uso di batterie scariche nel monitor o nel torace impedisce il corretto funzionamento del Practi-Man Plus. Non ci sono interferenze se si utilizzano batterie ricaricabili.





PULIZIA

Non utilizzare liquidi per la pulizia interna del manichino. Non immergere alcuna parte.

BATTERIA

Utilizzare esclusivamente batterie di consumo, non-ricaricabili, zinco carbonio o alcaline, 9V. Le batterie devono essere sostituite con il tipo corretto. Rimuovere le batterie se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo.

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

  PRACTI-MAN PLUS. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE sulla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 2011/65/UE RoHS sulle limitazioni dell'uso di sostanze pericolose.

 Smaltire conformemente alle normative del proprio Paese.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il sensore DAE del manichino PRACTI-MAN PLUS include componenti elettronici. Smaltirlo presso uno stabilimento per il riciclo appropriato in conformità con le normative locali.

Direttiva europea 2012/19/UE (RAEE). RAEE: l'etichettatura di questa apparecchiatura è conforme alla direttiva europea 2012/19/UE RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Lo smaltimento corretto del prodotto aiuta a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute, che potrebbero essere altrimenti causate da un trattamento inappropriato dei rifiuti del prodotto.

Il simbolo riportato sul prodotto, o sulla documentazione fornita con il prodotto, indica che l'apparecchiatura non deve essere trattata come rifiuto domestico. Dovrà, quindi, essere portata presso un punto di raccolta applicabile per il riciclo delle parti elettriche ed elettroniche, dove sarà smaltita nel rispetto delle normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate su come trattare, recuperare e riciclare il prodotto, contattare l'ufficio municipale preposto, il servizio di smaltimento di rifiuti domestici di zona o il rappresentante PRACTI-MAN PLUS presso cui il prodotto è stato acquistato.






PRACTI-MAN

plus

ELECTRONIC CPR TRAINING


MANUAL MONITOR



-  MONITOR WIRELESS
-  FEEDBACK ELETTRONICO
-  2 IN 1 FUNZIONE
ADULTO - PEDIATRICO
-  MODALITÀ BUIO
-  REPORT DEI RISULTATI DOPO LA PRATICA

PRACTI-MAN

CPR TRAINING SOLUTIONS

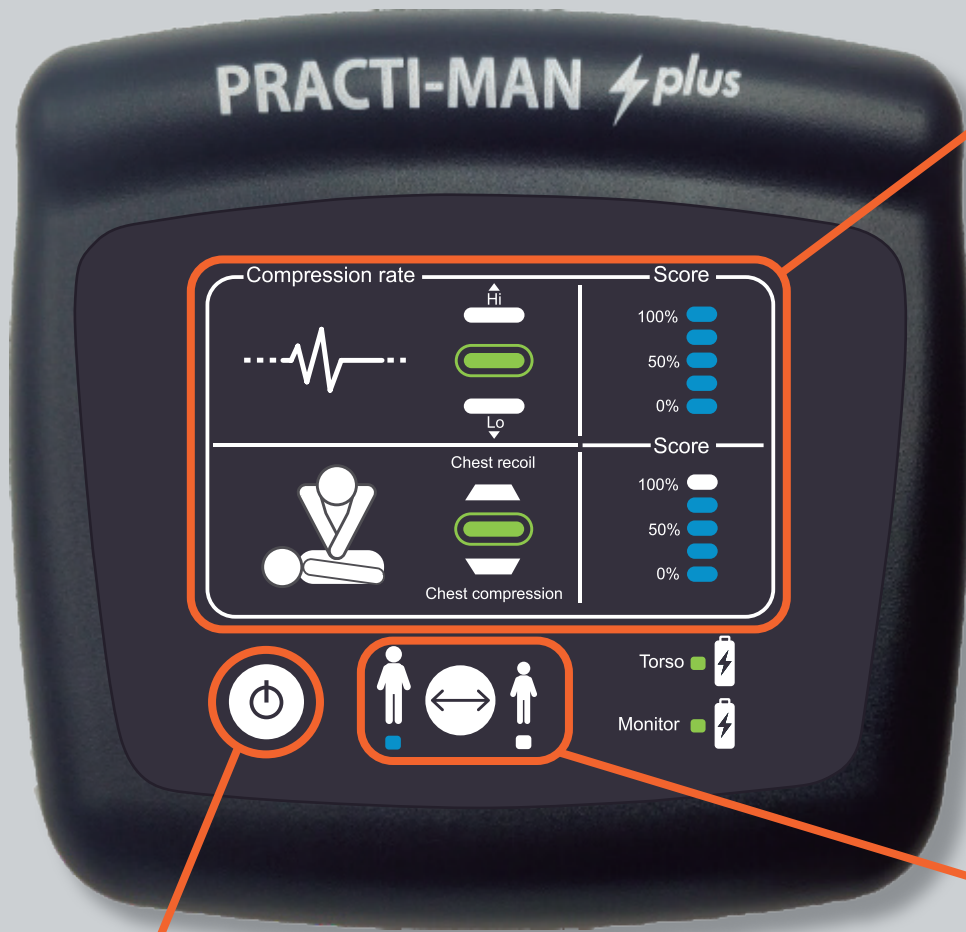




FUNZIONI PRINCIPALI

FEEDBACK COMPRESSIONE


FREQUENZA




PROFONDITÀ E RILASCIO

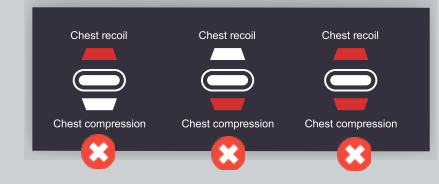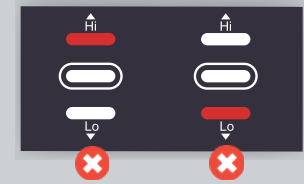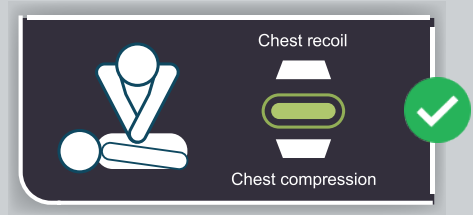

RISULTATI

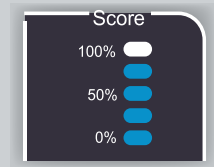


ATTENDERE
10 SECONDI

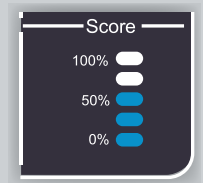

SET UP

Inserire le batterie nel torace e nel monitor. (Incluse in ogni confezione di Practi-Man Plus).

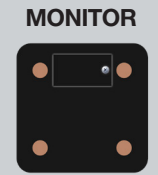

ABBINAMENTO



Accendere il monitor e premere il torace di Practi-MAN PLUS fino al doppio bip e all'illuminazione in verde della luce "TORSO". PRACTI-MAN PLUS è ora pronto per iniziare la pratica.

Quando si accende il monitor, la modalità ADULTO è attiva per impostazione predefinita.

ALTRE FUNZIONI


FUNZIONE ADULTO - PEDIATRICO

Permette di selezionare la modalità standard e buio per adulti e bambino, distinguendole con luce fissa o intermittente.

MODALITÀ STANDARD



MODALITÀ BUIO

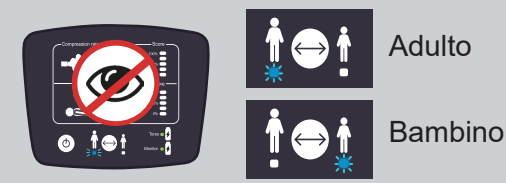

Premere il pulsante fino ad ottenere la luce fissa nella modalità scelta (Adulto – Bambino)

Premere il pulsante fino ad ottenere la luce intermittente nella modalità scelta (Adulto – Bambino).

Nella modalità buio, il feedback non è visibile durante la pratica, tuttavia, 10 secondi dopo il termine della sessione, il punteggio verrà visualizzato come nella modalità standard.