

MANUALE DI ISTRUZIONI

STERILIZZATORE A SECCO ARIA CALDA display con termostato e timer digitale potenza 500W - capacità 2lt



Rating Voltage: 220V/50HZ - Power: 500W

È risaputo che l'alta temperatura può uccidere con la massima efficacia i batteri e virus attaccati ad un oggetto in metallo. La temperatura massima del nostro sterilizzatore può raggiungere i 220 gradi Celsius. Questo dispositivo è ampiamente utilizzato nei laboratori, nei servizi di ristorazione e nei saloni di bellezza.

FUNZIONE PULSANTI:

- 1 - Premere il pulsante "Menu", iniziare a impostare il timer. Ad ogni pressione di "Impostazioni timer" il timer aggiunge 5 minuti. Ad ogni pressione di "Riduci temperatura/tempo" il timer riduce di 5 minuti. Il timer massimo è di 90 minuti. Dopo aver impostato il timer adatto, iniziare a impostare la temperatura.
- 2 - Premere il pulsante "Controllo della temperatura", lo schermo LCD lampeggia il numero 075. Iniziare l'impostazione della temperatura. Ad ogni pressione di "Impostazioni timer" la temperatura aggiunge 5 gradi Celsius. Ad ogni pressione di "Riduci temperatura/tempo" la temperatura si riduce di 5 gradi Celsius. La temperatura massima è di 220 gradi Celsius. Impostare la temperatura adatta. Dopo 5 lampeggi. L'apparecchiatura passa al riscaldamento automatico, allo stato del timer per il conto alla rovescia automatico.
- 3 - Premere il pulsante "Menu" per verificare quanti minuti hai impostato. Dopo che l'apparecchiatura funziona normalmente, la temperatura verrà visualizzata sullo schermo LCD.
- 4 - Se si desidera azzerare il timer e la temperatura. Premere il pulsante "Reset Key" per cancellare l'apparecchiatura o spegnere.

SICUREZZA E PRECAUZIONI

- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini
- Dopo la sterilizzazione, agganciare l'anello al vassoio ed estrarlo dal dispositivo.
- **NON TOCCARE LA VASSOIO CALDO CON LE MANI!.**

