

# MANUALE D'USO

cod. 122862-IT

RADIUM M-870

**APPARECCHIATURA ESTETICA SPOT REMOVAL  
PER LA RIMOZIONE MACCHIE CUTANEE ED IL  
TRATTAMENTO LOCALIZZATO DI IPERCROMIE**



Prodotto distribuito da: DOCTORPOINT SRL - [www.doctorpoint.it](http://www.doctorpoint.it)  
*Testo conforme a quanto dichiarato dal rispettivo Fabbricante e/o Importatore*

## Precauzioni

Memorizzare le istruzioni e il metodo di funzionamento prima dell'uso.

- Se ci si sente a disagio o si riscontra qualcosa di anomalo durante l'uso, spegnere immediatamente l'alimentazione e smettere di utilizzarlo.

- Non utilizzare su infanti e bambini, e posizionarlo in luoghi non facilmente accessibili ai bambini.

- Oltre al nostro personale tecnico, altri non devono smontare e trasformare il prodotto.

- Staccare sempre la spina di alimentazione dopo l'uso.

- Non conservare il dispositivo nei seguenti luoghi:

1 - Luoghi facilmente accessibili al vento, alla pioggia e luoghi in cui è facile che si accumuli acqua.

2 - Luoghi in cui viene utilizzato il fuoco, altri luoghi con alte temperature

3 - Luoghi umidi e polverosi

- Non danneggiare il cavo di alimentazione e non rielaborarlo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo immediatamente.

- Seguire la tensione configurata della macchina durante l'uso. Altrimenti potrebbe causare incendi e scosse elettriche.

- L'acqua che entra nel pannello operativo del prodotto potrebbe causare scosse elettriche e cortocircuiti. Si prega di interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista per l'ispezione.

- Quando non è in uso, prima spegnere l'unità principale e poi spegnere

l'alimentazione. Assicurarsi di staccare la spina. Pulire gli accessori di tanto in tanto.


- Quando si inizia a usarlo, si prega di non regolare l'intensità troppo alta. Si prega di usarlo a bassa intensità.

- Se si verifica un problema, interrompere l'uso per scoprirne il motivo.

1 - Non è consentito colpirlo, urtarlo o farlo cadere pesantemente sul pavimento per evitare di danneggiare lo strumento

2 - Quando si usa lo strumento, gli accessori non devono essere troppo vicini agli occhi o passare attraverso il bulbo oculare. È vietato l'uso su donne incinte e su pazienti con malattie cardiache.

M-870

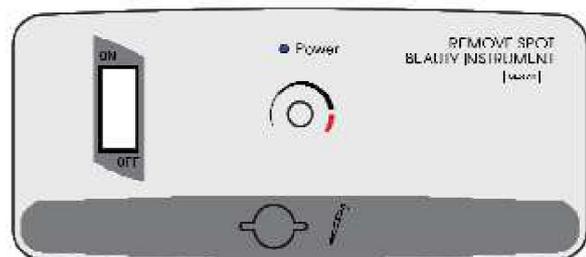

Prodotto distribuito da: DOCTORPOINT SRL - [www.doctorpoint.it](http://www.doctorpoint.it)

Testo conforme a quanto dichiarato dal rispettivo Fabbricante e/o Importatore

# Introduzione all'uso del RADIUM M-870

## Scopo del dispositivo

L'apparecchio è progettato per **frammentare e rimuovere la melanina in eccesso** responsabile della formazione di macchie cutanee, attraverso una tecnica di elettroagopuntura.

---

## Introduzione all'operazione

Il dispositivo è dotato di una **penna Spot Remover per la rimozione delle macchie**, che utilizza un ago sottile per trattare le imperfezioni cutanee in modo localizzato e preciso. Questo metodo è efficace per ridurre o eliminare macchie come cloasma, lentiggini, macchie solari, macchie dell'età, e persino tatuaggi superficiali.

---

## Istruzioni per l'uso

### 1. Preparazione del dispositivo

- Accendere l'interruttore di alimentazione.
- Regolare la manopola dell'intensità su una modalità moderata.
- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo controllando se emette una leggera scarica elettrica (ad esempio, toccando delicatamente una foglia o una superficie di sapone).

### 2. Rimozione delle macchie o nei

- Posizionare delicatamente l'ago della penna a contatto con la macchia cutanea.
- Muovere l'ago in modo orizzontale sulla zona da trattare.
- Durante l'operazione, si osserverà che la melanina si oscura e si frammenta, cadendo gradualmente.
- Per macchie piccole e superficiali, il trattamento può essere completato in **una sola sessione**. Per macchie più grandi o profonde, potrebbero essere necessarie **2-3 sessioni**.

### 3. Cura post-trattamento

- Evitare di **toccare l'acqua** sulla zona trattata per almeno 24 ore.
- Applicare una crema lenitiva o antinfiammatoria (su prescrizione medica) per favorire la guarigione e prevenire irritazioni.

---

## Indicazioni d'uso

Il dispositivo è adatto per il trattamento di:

- **Cloasma** (macchie scure causate da squilibri ormonali).
  - **Iperpigmentazione** post-infiammatoria da **Scottature solari**.
  - **Lentiggini e macchie dell'età**.
  - **Pigmentazioni indesiderate** dovute a tatuaggi superficiali errati.
- 


## Note importanti

- Utilizzare il dispositivo con **cautela**, seguendo sempre le istruzioni per evitare irritazioni o danni alla pelle.
  - In caso di dubbi o pelle sensibile, consultare il proprio Medico curante o un Dermatologo prima del trattamento.
- 

## Passaggi per l'utilizzo



Prodotto distribuito da: DOCTORPOINT SRL - [www.doctorpoint.it](http://www.doctorpoint.it)  
Testo conforme a quanto dichiarato dal rispettivo Fabbricante e/o Importatore

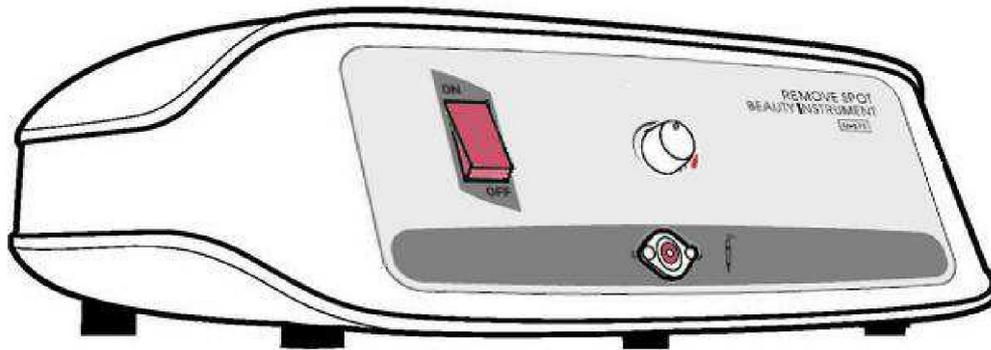

1x Ago spesso



1x Portaghi sottili



3x Ago sottile

## DATI TECNICI

Alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Potenza: 10W

Peso: 1,4kg

Peso con imballo: 2,7 kg.

Dimensioni del dispositivo: 30 x 29 x 13 cm

Dimensioni imballo: 34 x 34 x 21 cm

## DICHIARAZIONE CONFORMITA' CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

- EC COUNCIL DIRECTIVE 2014/30/EU EMC (Compatibilità elettromagnetica): EN55014-1:2006+ A1:2009+A2:2012 EN61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55014-2:2015
- EC COUNCIL DIRECTIVE 2014/35/EU LVD (sulla bassa tensione): EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2015+A11:2010 EN 62233: 2008
- Decreto Legge 15/10/2015 n.206 - Informativa 23 (per le attrezzature da uso estetico)
- CEI EN 60601-1

Prodotto distribuito da: DOCTORPOINT SRL - [www.doctorpoint.it](http://www.doctorpoint.it)

*Testo conforme a quanto dichiarato dal rispettivo Fabbricante e/o Importatore*