

MANUALE D'USO



ELETTROTERAPIA AD ALTA FREQUENZA

(cod. B-667-IT / 124225 / IDEBEAUTY-667)

ITALIANO

ALTA FREQUENZA (HIGH FREQUENCY)

Stimati clienti,

Grazie per aver scelto il nostro prodotto! Si prega di leggere questo manuale prima dell'uso, al fine di garantire le massime prestazioni dello strumento e la sicurezza d'uso. Per favore, conservarlo per riferimenti futuri.

FUNZIONE

Il pannello a sfioramento di questo strumento ad alta tecnologia presenta le seguenti funzioni:


1. Uso di raggi ultravioletti per sterilizzare la pelle e accelerare la guarigione delle ferite.
2. Sbarazzarsi di macchie, pigmentazione, brufoli e acne.

SPECIFICAZIONE

1. Funzionamento facile e veloce grazie all'adozione di tecnologie avanzate.
2. Trattamento intelligente e affidabile che prevede 10 livelli regolabili.
3. Vari metodi di selezione onda disponibili

PANNELLO DESCRIZIONE OPERAZIONI

1. Ridurre il tempo
2. Diminuire l'energia
3. Acceso/Spento
4. Aumentare il tempo
5. Aumentare l'energia
6. Indicatore d'attesa
7. Indicatore ON
8. Schermo del tempo

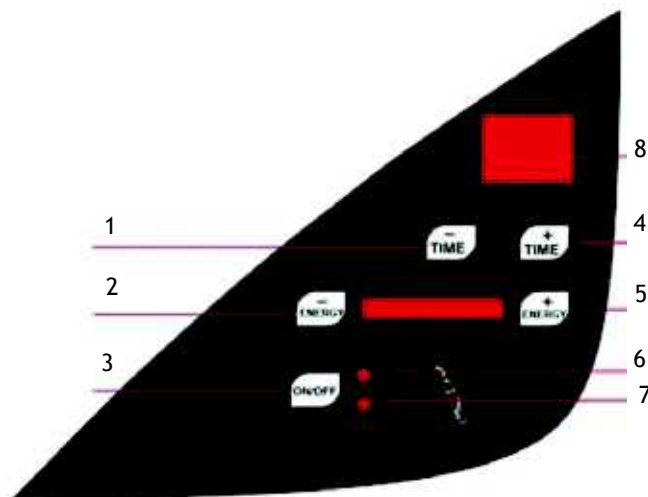

OPERAZIONE

1. Inserire l'elettrodo nella manopola e tenere bene.
2. Collegare, quindi si può sentire il suono di avvio, un "beep" (8). Il tempo indicato è 30 (minuti); l'energia è zero; (6) è rosso, il che significa che la macchina non è in uso.
3. Premere il tasto (3), l'indicatore diventa verde, il secondo punto (6) lampeggia, e viene avviato il funzionamento della macchina (8).
4. Aumentare / diminuire l'energia in 10 livelli premendo il tasto (5) e (2).
5. Testare l'energia elettrica toccando il metallo.
6. L'energia non deve essere troppo elevata per evitare eventuali lesioni, né troppo bassa per indebolire l'esito del trattamento.
7. Se è necessario rimuovere le macchie, muovere l'elettrodo sulla zona e si può vedere la melanina diminuire. Le macchie lievi possono essere rimosse con un solo trattamento, quelle più grandi necessitano 2-3 trattamenti.

NOTE

1. Prima di indossare i guanti, il tecnico deve pulire le mani con l'alcol
2. Gli elettrodi devono essere sterilizzati e mantenuti puliti e asciutti
3. Disinfettare la zona da trattare con alcol prima del trattamento.

4. Applicare crema lenitiva sulla zona 3 minuti prima di iniziare il trattamento.
5. Durante il trattamento, non sostare troppo tempo nella zona trattata per evitare cicatrici
6. Rimuovere tutti gli oggetti metallici (orecchini, collane, ecc) prima dell'operazione.

ATTENZIONE

1. Per spostare lo strumento, bisogna alzarlo e abbassarlo con cautela; in caso di guasto, si prega di non sbatterlo al fine di evitare malfunzionamenti causati dall'impatto.
2. Per spostare lo strumento, è necessario mantenerlo orizzontale in modo da evitare che urti e vibrazioni.
3. Non premere lo strumento o posizionare oggetti pesanti sullo strumento per evitare la deformazione dell'involucro, danni o malfunzionamenti.
4. È necessario selezionare la relativa fonte di alimentazione che lavora in accordo con le indicazioni sul corpo dello strumento.
5. Non è consentito usare questo strumento nella stanza da bagno.
6. Per evitare incidenti, quando c'è un temporale, si prega di spegnere e scollegare l'interruttore di alimentazione
7. Non è consentito iniettare alcun fluido nel corpo dello strumento per impedire danni dovuti a cortocircuiti.
8. Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo tempo, è necessario rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa

SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.

PARAMETRI TECNICI

Tensione: AC 220V - 240V

Potenza della macchina: 25W max

Formato dell'imballaggio: 26.5 * 14 * 22.5 (L * W * D) cm.

CERTIFICAZIONI

- 2014/30/EU EMC

- 2014/35/EU LVD

- 2011/65/EU Rohs

- Decreto legge 15/10/2015 n°206 - Informativa 13b (per le attrezzature in uso estetico)

- CEI EN 60601-1-2-3