



doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Nome commerciale: **MASCHERA PER RCP " POCKET E- MASK" – LATEX FREE**

Codice Doctorpoint: **FNI-0217** NSIS: **(nessuno)** CND: **R03010199**
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 NON STERILE

Descrizione Prodotto

Maschera CPR , con valvola di sicurezza e diaframma unidirezionali brevettati, provvista di elastico di bloccaggio impedisce il riflusso dell'aria o dei contaminatori dal paziente al soccorritore.

In plastica trasparente é progettata per un uso adulto e pediatrico. Il bordo é gonfiabile.

Fornisce una barriera fisica tra il soccorritore e la vittima, eliminando il contatto diretto delle labbra del soccorritore con il soggetto sconosciuto durante la respirazione bocca a bocca. La maschera, una volta posizionata, sigilla ermeticamente il viso, permettendo la ventilazione sia attraverso la bocca che attraverso il naso simultaneamente.

La maschera ben sopporta le temperature estreme. Con raccordi standard da 22 mm per il collegamento a fonte di ossigeno. Può essere usata con qualsiasi pallone o sistema di rianimazione. La cupola flessibile può essere ridotta ad una misura tascabile. Prodotto **privo di lattice**.

Astuccio per il trasporto con istruzioni.

Maschera compatibile Pocket Mask.

Misure: cm 13 X 11 X 4,5 circa

Peso: 100gr.

DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it



doctor POINT
Soluzioni medicali a portata di click

Dichiarazione di Conformità: Direttiva CEE 93/42

Marchiatura: CE - MADE IN PRC

PULIZIA E MANUTENZIONE:

La maschera di emergenza POCKET MASK è riutilizzabile e facile da pulire. Lavarla con acqua tiepida e sapone e successivamente sciacquarla con acqua pulita. Utilizzare 1:64 di candeggina diluita in acqua pulita per poter poi immergere la maschera per circa 10 minuti. Sciacquare nuovamente con acqua dolce e lasciare asciugare all'aria. La maschera non può essere disinfettata con soluzioni di gluteraldeide attivato. La valvola unidirezionale e il filtro sono monouso, destinati al singolo paziente e per questo devono essere eliminati dopo l'utilizzo.

Conservazione ed avvertenze:

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a temperature > 50°C. E' consigliato l'utilizzo da parte di personale adeguatamente specializzato.

Confezionamento:

Il prodotto è confezionato singolarmente in un sacchetto di polietilene. Il cartone è da 50 pezzi.

Smaltimento:

Il prodotto deve essere smaltito secondo la vigente normativa in merito allo smaltimento di rifiuti speciali.

Etichettatura:

Etichette aggiornate secondo Normativa vigente i Dispositivi Medici di Classe I non sterile.

La presente Scheda Tecnica è conforme da quanto dichiarato dal Produttore

Data ultimo Aggiornamento: 18/11/2020

DOCTORPOINT s. r. l.

Sede Legale: via Ugo Foscolo n.15 - 28021 Borgomanero (No)

P.I. / C.F. / Reg.Imp.Novara 02191520036 REA 221049 Cap. Soc. 10.000,00 € Int. Versato

Sede Operativa: via Garibaldi, 9 (angolo piazza San Giuliano) - 28024 Gozzano (No)

Tel. +39 0322 1951117 Fax. +39 0322 060188 Web: www.doctorpoint.it Email: info@doctorpoint.it