



Curette dermatologica monouso

- Lame in acciaio inox con manico in PP
- Manico rigato per una presa sicura e un migliore controllo
- Identificativo della misura su ogni curette
- Per il curettage di tessuti, prevalentemente cutanei
- Le curette sono sterili e monouso
- Campi di impiego: dermatologia, chirurgia, veterinaria e podologia


Misure



Imballo: ogni curette è confezionata in blister, 20 blister in un espositore, 20 espositori per ogni cartone export

Uso sicuro

- Conservare i prodotti nuovi in un luogo asciutto, pulito e sicuro
- Evitare le alte temperature, l'umidità elevata, la luce solare diretta, l'immersione in acqua e conservare a temperatura ambiente
- Non conservare assieme a prodotti chimici e in luoghi con presenza di gas
- È necessario controllare la data di scadenza su ciascuna confezione e ciascun espositore (tempo di conservazione 5 anni)
- Dopo aver controllato la data di scadenza su ogni confezione ed espositore si dovrà provvedere a smaltire i prodotti con data di scadenza superata
- Prima di utilizzare il prodotto controllare che non presenti componenti o parti staccate, piegate, rotte, incrinare, usurate o spezzate
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso. Mettere da parte il prodotto se danneggiato o difettoso
- È vietato il riutilizzo
- È vietata la risterilizzazione
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Non utilizzare il prodotto se si ritiene che la sterilizzazione sia compromessa dalla confezione non più integra
- Prima dell'apertura verificare che la confezione sia integra e non presenti fori.

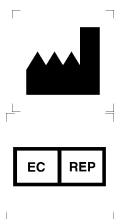

kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japan

kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Germania

CE0197

Il prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 93/42 CEE